

# Blood Glucose Tester Set

## 血糖測試儀套裝 (採血紙/採血針頭)

Model : HM-FJ

### Features:

- Micro blood sampling, blood sugar value is not affected by maltose, galactose, etc.
- Direct measurement, insert the strip and use it immediately, reduce measurement error, and better detect blood sugar
- High-definition screen display value, fast detection speed
- Five gears of the blood collection pen can be adjusted, and different gears can be adjusted according to different strengths
- The product uses battery life, long use time, automatic shutdown without operation
- 微量採血, 血糖值不受麥芽糖、半乳糖等影響。
- 直接測量, 即插即用, 減少測量誤差, 更好的檢測血糖
- 高清屏幕顯示值, 檢測速度快
- 採血筆五個檔位可調, 可根據不同的強弱調節不同的檔位
- 產品採用電池壽命長, 使用時間長, 無操作自動關機



### Specifications

Product model 產品型號	HM-FJ
Product function 產品功能	blood glucose test 血糖測試
Material 材質	ABS,LCD display ABS,液晶顯示
Memory function 記憶功能	memory measurement data were collected for 180 days 記憶量測數據180組d
measurement range 血糖測量範圍	1.1mmol/L~33.3 mmo1/L (20-600mg/dl)
Measuring time 測量時間	11±1秒 (倒數10個數)
Test method 檢驗方法	glucose oxidase method 葡萄糖氧化酶法
Power supply 電源方式	7 battery *2 7號電池 1.5*2
Product size 產品尺寸	8.6*5.6*2.5CM
Product weight 產品重量	55g (無電池)
Package size 包裝尺寸	1.5*12*5CM
Packing weight 包裝重量	200g

### Instructions

- ◆ 取出產品, 裝入兩節AAA電池, 插入試紙
- ◆ 將採血針取出裝入採血筆, 然後開始採血
- ◆ 將手指出血處對準試紙採血口, 血液吸收進去即可
- ◆ 等待幾秒後即可顯示測試結果

- ◆ 注意事項:
- 使用前和使用時請認真閱讀產品說明書
- 紅細胞壓積率是血液中含紅細胞的百分比紅細胞壓積率偏低會使量測結果偏高;紅細胞壓積率偏高則會使量測結果偏低
- 清潔後, 需徹底乾燥後再進行量測, 請勿使用碘酒消毒, 否則會影響量測結果
- 檢查確保血糖分析儀上顯示校正碼與血糖試紙包裝上的校正碼匹配
- 請勿觸摸血糖試紙的血液滴入口和接觸電極處, 避免污染試紙
- 請勿將血滴在試紙上方, 血糖分析儀和試紙置於血滴下方, 這可能會使血液進入儀器量測口並損壞儀器
- 切勿滴加彌散的血樣, 試紙吸取好血樣後, 請不要讓試紙再吸取血樣;在量測過程中請勿移動插在儀器中的試紙
- 如果確認視窗未被填滿, 可能顯示錯誤資訊或者量測結果不準確
- 如果兩分鐘內不滴血, 則血糖分析儀將自動關閉;您必須取出試紙再次插入血糖分析儀, 重新開始量測